

# Venue

## 背面吸気口掃除の仕方

※作業をするときは、電源を切り、背面ブレーカをOFFにして、電源コードを抜いて作業をしてください。



背面中部にBaffle Cover  
があります。

下端に指をひっかけ、上げ  
ながら手前に引き、カバー  
を外します。



フィルタを外した状態



ほこりを掃除機で吸い取る  
か、濡れタオル等でふき取っ  
てください。

フィルタに水分が付着した場合は完全に乾いてからフィルタを戻し  
電源を投入してください。