

8

白黒プリンタの清掃

プリントアウトされた画像に線が入ったり白い点が入る場合はプリンタのヘッドを付属のクリーニングシートで清掃してください。

* ヘッドクリーニングのやり方は機種により若干異なります。

Sony UP-D898シリーズ ヘッドクリーニングの仕方

① 付属のヘッドクリーニングシートを用意します。



⑤ メニューレバーを押します。



② Openボタンを押してドアを開けます。




⑥ メニューレバーを上下にたおして【CLEAN.TH】を表示させメニューレバーを押します



③ ヘッドクリーニングシートの黒い面を下にして、トレイ内に有る窪みに差し込みます。



⑦ 【CLEAN:-OK】が表示されている事を確認し、メニューレバーを押します。クリーニングが開始されます。

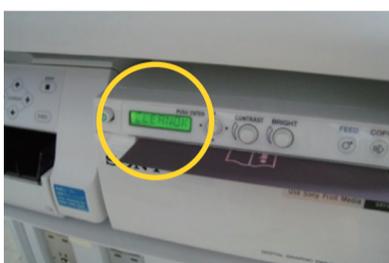

④ ドアを手で押して閉めます。



⑧ 液晶には【CLEAN.TH】と表示されます。クリーニングシートが止まりましたらクリーニング完了です。



9

白黒プリンタのペーパーカット

ペーパーをうまくカットできないと、次のプリントが斜めに印刷されたりローラーに絡むことがあります。

① 印刷します。



② 排出口 上部にカッターがあります。



拡大図



③ 左右どちらかの端から上にテンションをかけ切り取ってください。

