

プリントアウトされた画像に線が入ったり色ムラがでる場合は
プリンタのヘッドを付属のクリーニングシートで清掃してください。

Sony UP-25シリーズ ヘッドクリーニングの仕方

クリーニングシートの交換

- ① 給紙トレイを押して取り出す。



新品用紙に1枚だけ
クリーニングシートが
付属しています。



クリーニング用
カートリッジ

FOR CLEANING
表示

- ② 給紙トレイからプリント用紙を全て取り
除いてから、クリーニングシートを入れる。
印字されている面を下に向けてセットして
ください。
- ③ 給紙トレイをカチッと音がするまで
プリンタに差し込む

クリーニングカートリッジの交換

- ④ リボンドアパネルを開いてから、リボントレイを引き出す



- ⑤ インクリボンを取り出す
- ⑥ クリーニングカートリッジを
プリンタに取り付ける
- ⑦ リボントレイを奥まで
まっすぐに挿入してから、
リボンドアパネルを閉じる
- ⑧ 液晶ディスプレイの表示を
確認する「CLERN EXEC」

- ⑨ EXEC ボタンを押すと、約30秒クリーニングが
開始され、自動的に排出されます。



クリーニング完了

プリント用紙・カラーカートリッジを
再セットしてご使用ください。