

GE ヘルスケア・ジャパン株式会社製超音波診断装置の 消毒および除菌について

2025年1月

拝啓

時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

ご使用いただいております弊社超音波診断装置本体やプローブの消毒および除菌について、以下の様な薬剤を推奨させていただいておりますので日々の安全な診療にお役立ていただければ幸いです。

敬具

記

超音波診断装置本体

■ LOGIQ シリーズ(LOGIQ e Smart を除く)、Versana シリーズ

- 各装置取扱説明書のメンテナンス章に記載の薬剤
- 0.05%の次亜塩素酸ナトリウム水溶液※消毒後水拭き
- 白十字社製 ショードックスーパー (76.9~81.4vol%エタノール含有)
- サニクロス SANI CLOTH HB (第四級アンモニウム塩溶液)
- サラヤ社製 環境清拭クロス (第四級アンモニウム塩溶液含有)
- スキットクロス・スキットクロスリフィル (両性界面活性剤、第四級アンモニウム塩溶液含有)
- 画像診断装置用 清拭・除菌シート(第四級アンモニウム塩溶液含有。詳細は[こちら](#))

※薬剤の使用は取扱説明書に従い、直接噴霧せず部位によって適切な薬剤で清拭してください

一般のプローブ

- 各プローブ向け医療機器添付文書に掲載されている薬剤
- 消毒エタノール (76.9~81.4vol%)
- 70%イソプロパノール (イソプロピルアルコール)
- 0.05%の次亜塩素酸ナトリウム水溶液※消毒後水拭き
- 白十字社製 ショードックスーパー (76.9~81.4vol%エタノール含有)
- サニクロス SANI CLOTH HB (第四級アンモニウム塩溶液含有)
- Protex ULTRA 消毒 Wipe (第四級アンモニウム塩溶液含有)
- サラヤ社製 環境清拭クロス (第四級アンモニウム塩溶液含有)
- ソフライト除菌クリーナー (第四級アンモニウム塩溶液含有)
- スキットクロス ワイド (両性界面活性剤、第四級アンモニウム塩溶液含有)
- Trophon2
- 画像診断装置用 清拭・除菌シート(第四級アンモニウム塩溶液含有。詳細は[こちら](#))

経食道プローブ

- 経食道プローブは[こちら](#)

※全てのプローブでこれらの薬剤が使用できるわけではありません。最新の情報は下記の英語版 Web サイトをご覧ください。また本英語版 Web サイトには日本では医療機器製造販売認証・承認がされておらず日本国内では販売されていないプローブも掲載されておりますことをご了承ください。

<https://www.gehealthcare.com/products/ultrasound/ultrasound-transducers>

※本英語版 Web サイトは世界共通のページであり、国内で一般的でない薬剤も掲載されておりますので必要な薬剤については薬剤を取り扱う業者様へお問い合わせいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

0.05%次亜塩素酸ナトリウムの希釈消毒液の作り方

6%次亜塩素酸ナトリウム (ハイターなど) から 0.05%に希釈した消毒液の作り方

1. 水 3L をご準備ください
2. 6%次亜塩素酸ナトリウム (ハイターなど) 25ml をご準備ください
3. 1 と 2 を混ぜてください

※希釈前に保護具(サージカルマスク、ニトリル手袋、保護めがね)を着用すること