


Invenia ABUS

フィルタ掃除の仕方


※作業をするときは、電源を切り、背面ブレーカをOFFにして、電源コードを抜いて作業をしてください。

装置下部にフィルタがあります。

外柵に指をひっかけ、下げながら手前に引き、
フィルタを外します。

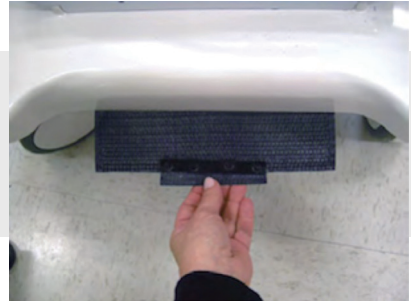

フィルタを外した状態

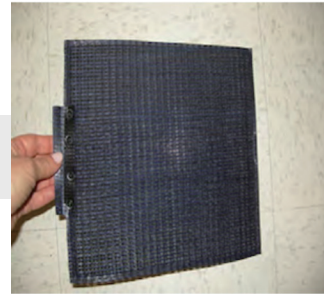

ほこりを掃除機で吸い取るか、
濡れタオル等でふき取る、
または、中性洗剤で洗ってください。
フィルタに水分が付着した場合は
完全に乾かしてから装置に戻してください。

終了後、フィルタを戻し完了です。

