

プリントアウトされた画像に線が入ったり白い点が入る場合はプリンタのヘッドを付属のクリーニングシートで清掃してください。

Sony 898 シリーズ

ヘッドクリーニングの仕方

※ヘッドクリーニングのやり方は機種により若干異なります。

- 1 付属のヘッドクリーニングシートを用意します。



- 2 Openボタンを押しドアを開けます。



- 3 ヘッドクリーニングシートの黒い面を下にして、トレイ内にあるくぼみに差し込みます。



- 4 ドアを手で押して閉めます。




- 5 メニューレバーを押します。



- 6 メニューレバーを上下にたおして「CLEAN.TH」を表示させメニューレバーを押します。



- 7 「CLEAN:-OK」が表示されている事を確認し、メニューレバーを押します。クリーニングが開始されます。

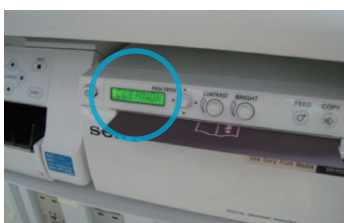

- 8 液晶には「CLEAN.TH」と表示されます。クリーニングシートが止まりましたらクリーニング完了です。



Sony UP-D711 シリーズ

ヘッドクリーニングの仕方

※ヘッドクリーニングのやり方は機種により若干異なります。


- 1 付属のヘッドクリーニングシートを用意します。



- 2 Openボタンを押しドアを開けます。




- 3 ヘッドクリーニングシートの黒い面を下にして、トレイ内にあるくぼみに差し込みます。

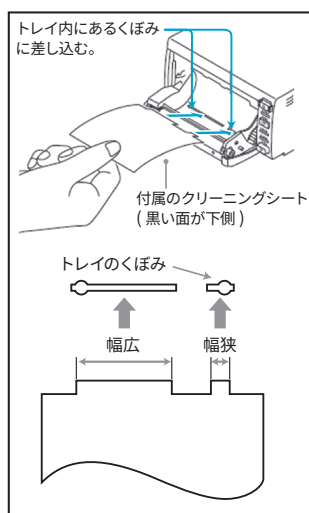

- 4 ドアを手で押して閉めます。



- 5 PAPERのLEDが点灯するまで、FEEDボタンを押し続けます。

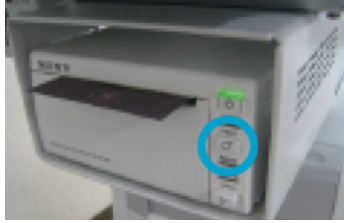

- 6 アラーム音が鳴りましたら、クリーニング完了です。




ペーパーをうまくカットできないと、次のプリントが斜めに印刷されたりローラーに絡むことがあります。

- 1 印刷します。



- 2 排出口上部にカッターがあります。

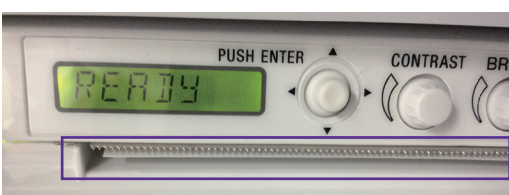

拡大図



- 3 左右どちらかの端から上にテンションをかけ、切り取ってください。

