

11

カラープリンタの清掃(感熱ヘッド)

プリントアウトされた画像に線が入ったり色ムラがでる場合はプリンタのヘッドを付属のクリーニングシートで清掃してください。

Sony UP-25シリーズ

ヘッドクリーニングの仕方

クリーニングシートの交換

- 給紙トレイを押して取り出します。







- 給紙トレイからプリント用紙を全て取り除いてから、クリーニングシートを入れます。印字されている面を下に向けてセットしてください。

- 給紙トレイをカチッと音がするまでプリンタに差し込みます。

クリーニングカートリッジの交換



- リボンパネルを開いて、リボントレイを引き出します。
- インクリボンを取り出します。
- クリーニングカートリッジをプリンタに取り付けます。
- リボントレイを奥までまっすぐに挿入してから、リボンパネルを閉じます。
- 液晶ディスプレイの表示を確認し、「PRESS EXEC」というメッセージが表示されたら「EXEC」を押します。

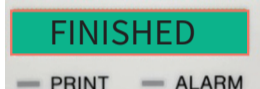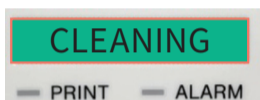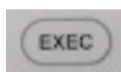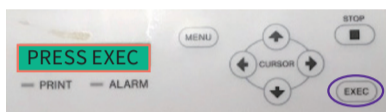


- 「EXEC」ボタンを押すと、約30秒クリーニングが開始され、自動的にシートが排出されます。「FINISHED」というメッセージが表示されたら終わりです。

プリント用紙・カラーカートリッジを再セットしてご使用ください。

12

カラープリンタの清掃(給紙ローラー)

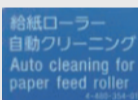

給紙ローラー自動クリーニング機能が搭載されている場合は本作業は不要になります。液晶ディスプレイに「CLEAN ROLL」表示が出た場合行ってください。

- 給紙トレイを引き出して中のプリント用紙を全て取り出します。




- 空の給紙トレイをカチッと音がするまでプリンタに差し込みます。



- メニューボタンを押し、「COLOR」を表示し、CURSORの右矢印で「SET UP」表示にします。



- CURSORの上下矢印で「CLEAN ROLL」表示にします。

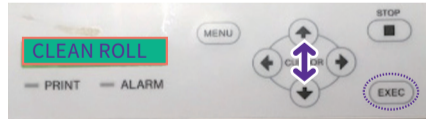

- CURSORの右矢印で「PRESS EXEC」表示にし、「EXEC」を押します。



- 「EXEC」ボタンを押すと、クリーニングが開始され、約20秒で給紙トレイが排出されて「CLEAN ROLL」表示が消えます。「SET PAPER」が表示されます。

プリント用紙を再セットしてご使用ください。