


# 8

## エアフィルタの清掃

本体のエアフィルタを定期的に清掃してください。  
フィルタの目詰まりにより内部温度が上昇して、正常稼動範囲を超える恐れがあります。

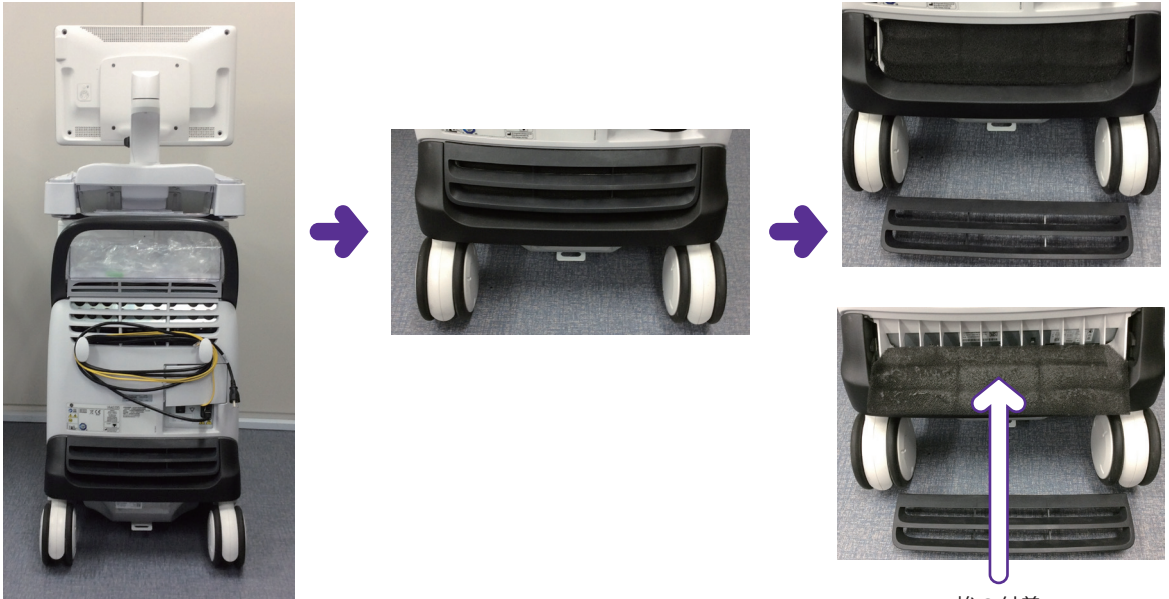

埃の付着

※エアフィルタの設置位置、枚数は機種により異なります。各装置のフィルタは次項参照してください。

装置が加熱したり、ファンの音が通常と違う場合は  
使用を中止して、エアフィルタの確認等必要な処置を取ってください。

※内部温度上昇は、エアフィルタの目詰まりとは別の要因で発生する場合があります。

### Point

清掃の目安は半月～1ヶ月に1回ですが、装置や設置場所によって異なります。  
取扱説明書等を必ず参照し、必要に応じて実施してください。